



Raskaustesti Helppo & nopea

RFSU Raskaustestin avulla voit nopeasti ja helposti selvittää, oletko raskaana.

Testin herkkyys on 25 mIU/ml. Testin voi tehdä siitä päivästä lähtien, kun kuukautisten olisi pitänyt alkaa. Mittaus on varminta aamuvirtsasta. Testimenetelmä on sama kuin kätilöiden ja gynekologien käyttämissä testeissä.



Lue ohjeet huolellisesti!

Kysymyksiä ja vastauksia

Miten RFSUn Raskaustesti toimii?

Raskauden alkaessa keho alkaa erittää hCG-hormonia (human Chorionic Gonadotropin). Raskauden alkuvaiheessa hCG-hormonin pitoisuus virtsassa nousee. Raskaustesti mittaa tätä hormipitoisuutta, ja testin voi tehdä kuukautisten odotetusta alkamispäivästä lähtien. Jos testaat aikaisessa vaiheessa tai olet epävarma tuloksesta, on hyvä tehdä uusi testi kahden päivän kuluttua, mieluiten ensimmäisestä aamuvirtsasta.

Miten luotettava RFSUn Raskaustesti on?

RFSUn Raskaustesti on yli 99 % varma kuukautisten odotetusta alkamispäivästä lähtien. Äitiysneuvolat ja gynekologit käyttävät samankaltaista testiä.

Miten pian RFSUn Raskaustestin voi tehdä?

Voit tehdä RFSUn Raskaustestin jo kuukautisten odotetusta alkamispäivästä lähtien. Jos kuukautiset ovat epäsäännölliset, ota testattaessa huomioon viimeisimpien kuukautistesi pisin kiertö.

Vaikuttaako juotu nestemäärä tulokseen?

Hyvin suuri nestemäärä voi laimentaa virtsaa siten, ettei testi havaitse sen sisältämää hCG-hormonia. Pidä siksi juomasi nesteen määrä tavanomaisella tasolla. Virtsan hCG-pitoisuutta voi lisätä juomalla vähemmän ja pidättäytymällä virtsaamasta n. 2 tuntia ennen testausta. Aamuvirtsasta mittaaminen antaa varmimman tuloksen.

Voivatko lääkkeet ja sairaudet vaikuttaa tulokseen?

hCG:tä sisältämättömien e-pillereiden, särkylääkkeiden, antibioottien tai hormonikäsittelyjen ei pitäisi vaikuttaa testin tulokseen. Joillakin seuraavista voi olla vaikutusta testin tulokseen: jotkin lääkkeet, kohdun myooma, menopaussi/vaihdevuodet, sekä jotkin hormonit, jotka voivat vaikuttaa LH-, FSH- ja TSH- ynnä muiden hormonien kerääntymiseen. Kysy tarvittaessa neuvoa lääkäriltä. Sama koskee joitakin harvinaisia sairauksia, tai jos virtsassa on suuria bakteerimääriä. Ota yhteyttä neuvolaan tai gynekologiin, jos saat odottamattoman tai epäjähdön mukaisen tuloksen. Joissakin harvinaisissa tapauksissa vaihdevuodet tai niiden lähestyminen aiheuttavat virheellisen positiivisen tuloksen raskaustestissä hCG-hormonia muistuttavan hormonin vuoksi. Hakeudu lääkäriin, jos tulos on positiivinen. Kohdunulkoinen raskaus ja munasarjakystat voivat antaa virheellisen tuloksen. Tietyt sairaudet ja syöpäsintymät voivat vaikuttaa testin tulokseen siksi, että ne vaikuttavat raskaushormonin tuotantoon. Tällaisesta sairaudesta kärsivän tulee hakeutua lääkäriin vastaanotolle ennen testin tekemistä.

Tärkeää muistaa

- Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. RFSU Raskaustesti on tarkoitettu vain hCG-hormonin mittaamiseen virtsasta käyttöohjeen mukaisesti. Mikäli käyttöohjetta ei noudateta yksityiskohtaisesti, tulos voi olla virheellinen.
- Testi on tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön, ja jokaista tikkua on tarkoitus käyttää vain kerran.
- Älä käytä testiä viimeisen käyttöpäiväyksen jälkeen (viimeinen käyttöpäivä on merkitty pakkaukseen).
- Tietyt lääkkeet saattavat aiheuttaa virheellisen tuloksen. Näin voi käydä myös joidenkin sairauksien yhteydessä, tai mikäli virtsassa on paljon bakteereita.
- Mikäli et ole varma tuloksesta tai tulos ei vastaa odotuksiasi, ota yhteys lääkäriin, neuvolaan tai gynekologiin.
- Kierrätä! Lajittele pakkaus paperinkeräykseen ja käytetty testi sekajätteeseen.

Mitä raskauden aikana tapahtuu?

Kun munasolu hedelmöittyy, hCG-hormonia (human Chorionic Gonadotropin) erittyy virtsaan ja sen pitoisuus lisääntyy raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Virtsan hCG- eli istukkahormonipitoisuuden perusteella voidaan selvittää, onko nainen raskaana. RFSU Raskaustestin avulla selvität itse nopeasti ja helposti, oletko raskaana. Testi on yli 99% varma kuukautisten odotetusta alkamispäivästä lähtien ja se on samankaltainen kuin äitiysneuvolan ja gynekologien käyttämä testi.

Testin voi tehdä kuukautisten odotetusta alkamispäivästä lähtien. Testin voi tehdä mihin vuorokaudenaikaan tahansa, mutta aamuvirtsasta mittaaminen on varminta. Jos olet raskaana, ota yhteyttä neuvolaan tai gynekologiin ohjeistusta varten. Jos et ole raskaana, etkä halukaan tulla raskaaksi, käytä kondomia tai ota yhteyttä ehkäisyneuvolaan tai gynekologiin ehkäisyä koskevaa neuvontaa varten.

Jos yhtään viivaa ei ilmesty?

Jos kontrolliviiva puuttuu täysin, tee uusi testi ja noudata tarkasti käyttöohjetta. Viivan puuttuminen voi johtua virheellisestä testaustavasta.

Minkä värisiä viivojen tulee olla?

Värisävy testiviivassa (T) voi vaihdella vaalean- ja tummanpunaisen välillä riippuen virtsan hCG-pitoisuudesta. Viivan värin vaaleudella tai tummuudella ei ole vaikutusta tulokseen, mutta vain punainen/vaaleanpunainen väri antaa pätevän tuloksen. Jos saat tuloksena muun värisen testiviivan, tee uusi testi 2 päivän kuluttua. Joskus testiviiva (T) voi olla harmaa/valkoinen sävyllään: testitulos on tällöin negatiivinen. Testi on positiivinen vain, kun testiviiva (T) on näkyvästi punainen, purppura tai vaaleanpunainen väritään. Kontrolliviiva (C) voi olla tummempi kuin testiviiva (T) ja päinvastoin, tämä ei vaikuta tulokseen. Myöskään värien erot kontrolliviivassa (C) kahden eri raskaustestin välillä eivät vaikuta testien tulokseen.

Miten pitkään tulos näkyy ennen kuin se haalistuu tai muuttuu?

Positiivinen tulos säilyy useimmiten muuttumattomana, mutta tausta voi tummetta. Älä lue testitulosta enää 5 minuutin jälkeen, sillä se saattaa antaa harhaanjohtavan tuloksen.

Mitä pitäisi tehdä, jos tulos osoittaa raskauden?

Ota yhteyttä äitiysneuvolaan tai gynekologiin ja varaa aika ohjeistusta varten.

Mitä pitäisi tehdä, jos tulos osoittaa, etten ole raskaana?

Tulos on 99% varma. Tavallisessa kuukautiskierrossa vuodot tulevat 12–14 päivää munasolun irtoamisen jälkeen. Ensimmäisestä vuotopäivästä munasolun irtoamiseen kuluva aika voi kuitenkin vaihdella, ja se aiheuttaa joskus epäsäännölliset kuukautiset. Jos testin tulos on negatiivinen, se voi johtua siitä, että munasolu irtosi luultua myöhemmin. Jos kuukautisia ei ole tullut, uusi testi n. viikon kuluttua. Jos tulos on edelleen negatiivinen, eikä kuukautisia ole tullut, ota yhteyttä lääkäriin tai gynekologiin.

Säilytys

Säilytä testiä ehjässä pakkauksessa jääkaapissa tai huoneenlämmössä. Testiä ei saa säilyttää alle +4°C tai yli +30°C lämpötilassa. Älä jätä pakkausta suoraan auringonvaloon, kosteaan tai kuumaan tilaan. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

RFSU Raskaustesti on kehitetty yhteistyössä RFSU Klinikin kanssa. Lisätietoja tuotteesta löydät osoitteesta www.rfsu.com

RFSU on voittoa tavoittelematon aatteellinen järjestö. Toimintamme tuottojen ylijäämää käytetään seksuaaliterveys- ja ihmisoikeustyöhön Pohjoismaissa ja muualla maailmassa.


Haluatko tietää lisää raskaudesta ja hedelmällisyydestä, tai onko sinulla kysymyksiä tuotteistamme? Lue lisää: rfsu.com



v2019-02-01:06 art nr 135015F


Näin teet testin

Testin voi tehdä mihin vuorokaudenaikaan tahansa kuukautisten odotetusta alka-mispäivästä lähtien, mutta aamuvirtsasta mittaaminen on varminta, koska hCG-pitoisuus on silloin korkeimmillaan. Jos testi osoittaa heikon positiivisen tuloksen, suosittelemme tekemään uuden testin parin päivän kuluttua. **Kun olet lukenut ohjeet ja olet valmis tekemään testin, ota testitikku sisäpakkauksesta ja käytä testi mahdollisimman pian. Pidä kiinni punaisesta päästä, ÄLÄ KOSKETA valkoiseen alueeseen, jotta testi ei anna väärää tulosta.**

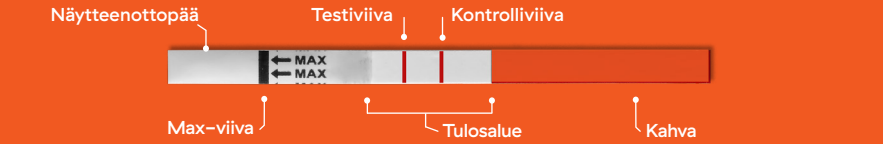


Vaihe 1. Testaus

- Kerää virtsaa puhtaaseen ja kuivaan astiaan.** Pari senttimetriä pohjalla riittää.
- Pidä kiinni punaisesta päästä, ÄLÄ KOSKETA valkoiseen alueeseen, jotta testi ei anna väärää tulosta.**
- Upota näytteenottopää virtsaan siten, että nuolet osoittavat alaspäin.** Älä upota tikkua max-viivaa syvemmälle. Nosta tikku pois 15 sekunnin kuluttua ja laita se tasaiselle, puhtaalle ja kuivalle alustalle.

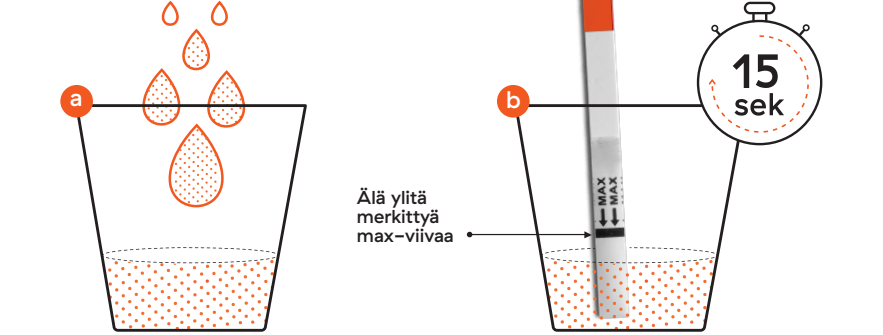


Vaihe 2. Odota 1-5 minuuttia

Odota 1-5 minuuttia koskematta tikkuun. Kun testi alkaa reagoida, koko tulosalue värjäytyy vaaleanpunaiseksi. Älä lue testitulosta enää 5 minuutin jälkeen, sillä se saattaa antaa harhaanjohtavan tuloksen.

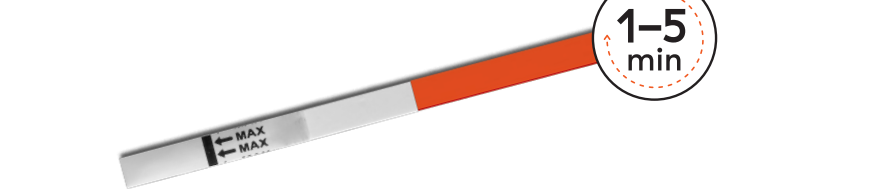

Vaihe 3. Lue testin tulos

Tulosalueen vaalealle taustalle ilmaantuu yksi tai kaksi punaista/vaaleanpunaista viivaa. Toinen on kontrolliviiva ja toinen testitulos. **Lue tulos mahdollisimman pian 1-5 minuutin sisällä. Älä lue testitulosta enää 5 minuutin jälkeen, sillä se saattaa antaa harhaanjohtavan tuloksen.**

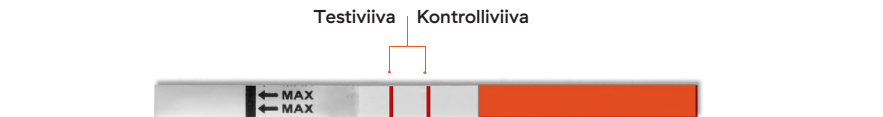

Positiivinen tulos – Raskaana

Kaksi selkeää punaista/vaaleanpunaista viivaa ilmestyy tulosalueelle. Jos näet kaksi selkeästi punaista/vaaleanpunaista viivaa, niin olet todennäköisesti raskaana. Testiviivan (T) värin vahvuus ja sävy voi vaihdella, sillä hCG-hormonin määrä vaihtelee raskauden vaiheesta riippuen. Jos testaat aikaisessa vaiheessa tai olet epävarma tuloksesta, on hyvä testata kahden päivän kuluttua uudelleen, mieluiten aamuvirtsasta. Jos olet raskaana, ota yhteyttä neuvolaan, gynekologiin tai lääkäriin ohjeistusta varten.

Negatiivinen tulos – Ei raskaana

Jos tikussa näkyy vain yksi värillinen viiva, et ole raskaana. Jos kuukautisia ei kuitenkaan kuulu, tee uusi testi 2 päivän kuluttua mieluiten aamuvirtsasta. Jos tulos on edelleen sama, eikä kuukautiset ole alkaneet, ota yhteyttä gynekologiin, neuvolaan tai lääkäriin.

Epäonnistunut tulos

Jos punainen/vaaleanpunainen kontrolliviiva (C) ei näy, tai jos yhtään viivaa ei näy testi-ikkunassa, tai jos viivat ovat erivärisiä kuin punainen/vaaleanpunainen/violetti, niin testi ei ole toiminut odotetusti eikä tulos ole pätevä. Tämä saattaa johtua siitä, että näytteenottopää ei ole imenyt riittävästi virtsaa, tai testi on tehty virheellisellä tavalla. Tee tällöin uusi testi ja seuraa ohjeita huolella. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä RFSU:hun.

Joskus testiviiva (T) voi olla harmaa/valkoinen sävyllään: testitulos on tällöin negatiivinen. Testi on positiivinen vain, kun testiviiva (T) on näkyvästi punainen, purppura tai vaaleanpunainen väritään.