

GRAVIDITETSTEST VECKOINDIKATOR

Semikvantitativt hCG-graviditetstest i urin

Med RFSU Graviditetstest Veckoindikator kan du
själv snabbt och enkelt ta reda på om du är gravid.

- Med veckoindikator: Vid ett positivt resultat anges även hur många veckor som gått sedan befruktningsdagen.
- Testets känslighet är 25 mIU/ml av hormonet hCG (human Chorionic Gonadotropin) i urinen.
- Testet ger mer än 99% säker resultat från dagen då du värnt om din mense.

Vill du veta mer om graviditet eller har frågor om våra produkter, läs mer på rfsu.com.

Läs instruktionerna noggrant!

Avsedd användning
Semikvantitativt själv-test avsedd för detektion av hCG (human Chorionic Gonadotropin) i urin för tidig upptäckt av graviditet.Avsedd användare
För hemmabruk till kvinnor i fertilitäder.

- Innehåll**
- Ytterförpackning: foliepåse, bruksanvisning
 - Foliepåse: 1 st teststicka, 1 st kottmedel

Material som behövs men inte ingår
Timer och uppåmlingskopp.

FRÅGOR & SVAR

När kan jag börja testa med RFSU Graviditetstest Veckoindikator?

Du kan ta testet 4 dagar innan förväntad menstruation. Har du oregelbunden menses, testa med hänsyn till den längsta menstruationscykeln du har haft de senaste mädrarna. Om du testar tidigt innan förväntad menstruation och testet visar ett negativt eller svagt positivt resultat rekommenderas att testa igen efter 48–72 timmar och med morgonurin.

Vad ska jag göra om testet visar att jag inte är gravid?

Ett negativt testresultat visar att ingen hCG har identifierats i din urin eller att koncentrationen av hCG är för låg för att upptäckas (under 25 mIU/ml). I en normal menstruationscykel kommer blödningarna att inträffa 12–14 dagar efter förgröningen. Tiden från första blödningstämma till ägglossning kan dock variera mer och det är detta som ibland är upphov till oregelbunden mense. Om testet visar negativt kan det bero på att du har ägglossning äldre än din urin. Om du testade tidigt är det bra att testa på nytt 2–3 dagar senare, helst med den första morgonurinen. Om du är gravid, kontakta barnmorska eller gynekolog för rådgivning.

Hur tillförlitlig är RFSU Graviditetstest?

RFSU Graviditetstest ger mer än 99% säker resultat från och med den dag du förväntar din menstruation.

Försiktighetsåtgärder!

- Forvara sättomligt för barn.
- Läs bruksanvisningen nogräff för användning. Om instruktionen inte följs i detalj, kan utefter bli felaktigt.
- Använd inte testet efter utgångstdatum (se ytterförpackningen) eller om folieplasten verkar skadat.
- Teststica ska ha rumstemperatur vid användning. Efter öppnande bör teststicken användas inom 2 timmar.
- Endast nyligen taget urinprov bör användas. Urinen kan förvaras i kylskåp (0–8°C) i 48 h. Vid testning ska urinprovet ha rumstemperatur.
- Enheten innehåller smal delar, t.ex. kottmedel, som inte får sväljas.
- Testet är enbart avsedd för utvärtes bruk och varje teststika för engångsbruk. Får ej förtäras.
- Om hCG-koncentrationen är mycket hög kan kontrolllinjen bli blek, vilket är normalt.
- Du kan ta testet från 4 dagar innan förväntad mens. hCG-koncentrationen är då låg, vilket kan resultera i ett negativt resultat. Testa igen efter 48–72 timmar med morgonurin.

Tests begränsningar

- Testet ska användas för att identifiera hCG i urinprover. Koncentrationen av hCG i urinprovet kan inte bedömas med hjälp av teststicken och kontrollernas färgstyrka och mättmed. En kontaminerad teststreck, felaktig användning eller något annat störande ämne kan medföra felaktiga resultat. Gör om testet om du misstancker att resultaten är felaktiga.
- Testets omfattning på vänter sida visar att den vänstra teststrecken är 0–10000 mIU/ml, medan den på höger sidan är 0–1000 mIU/ml. Om du har en svag färg och färgen är 1/3 till 2/3 av märket, T2, eller om verkan är 1/2 till 2/3 av märket, T3, kan det bero på HCG-effekten. Om du vill veta exakta resultaten bör du köpa ett nytt test, spada provet 1:10 eller 1:100 med avjoniserat vatten och testa igen.
- hCG kan detekteras i urin som påverkar testresultatet; vissa mediciner, myom i livmoderen, menopaus/klimakteriet, ökad koncentration av hormoner såsom LH, FSH och TSH etc. Det sätts emellertid stor märke till att kontrollera om din menses härliga storlek är normal. Kontakta din barnmorska eller gynekolog om du får oväntade eller inkonsekventa resultat.

FOR THE FREEDOM
OF EVERY BODY
BY CHOOSING RFSU PRODUCTS
YOU SUPPORT OUR ONGOING WORK
FOR SEXUAL AND HUMAN RIGHTS.

GRAVIDITET & SJÄLVTESTER

När du blir gravid börjar kroppen producera ett hormon som heter hCG (Human Chorionic Gonadotropin). Nallen är hCG stiger under den tidiga graviditeten. Genom att spära hCG i urinen kan man avgöra om en kvinna är gravid eller inte.

Graviditetstest kan detektera en mycket liten koncentration av hCG i urinen. Koncentrationen av hCG hos icke-gravidkvinnor är normalt mindre än 5,0 mIU/ml. Vid tidpunkten för den sista utelivliga menstruationen är hCG-nivåerna i urinen cirka 100 mIU/ml med högsta nivåer på 100 000 till 200 000 mIU/ml. Under de första 8–10 veckorna av graviditeten ökar hCG snabbt för att upprätthålla graviditeten. Innan de första 1 till 2,5 veckorna av graviditeten kan hCG-halten i sennan och urin snabbt stiga med 66%. Efter cirka 8 veckors graviditet börjar hCG minskas gradvis, till en relativt stabil nivå efter cirka 20 veckor.

Testprincip

Graviditetstest baseras på en kvalitativ detektion av hCG i urinprov och använder en immunonormografisk teknik. Testet avhänger av att korongonadotropini (hCG) (kolloidalt guldmarkat) och hCG-monoklonala antikroppen (hCG-märkta immunonormografisk sandwichmetod) för att bestämma hCG-iinhället i din urin med semikvantitativ metod. Det finns två resultatfönster, på både vänster och höger sida. Från överst till nedst är resultaten från vänster beläget med kontrolllinje C och testlinje T3 & T1, med resultaten från höger beläget med kontrolllinje C och testlinje T3 & T1. Under testet kommer urinen innehållande hCG att rinna över teststicken. Denna urin kommer i vissa mängd i hCG-komplexet och kolloidalt guldmarkat anti-hCG monoklonala antikroppen att binda till hCG urinen och bilda en förening av kolloidalt guldmarkat anti-hCG monoklonala antikropp - urin-hCG, och fortsätta att dras upp, till den reagerar med anti-hCG monoklonala antikropp (T4) på relevanta koncentrationer vid teststjärna (T1/T2/T3/T4), som är belägen i resultaten från vänster. Resultatet visar att hCG-dubbelt-antikoppssandwichförening av kolloidalt guldmarkat anti-hCG monoklonala antikropp - urin-hCG-anti-hCG monoklonala antikropp. Vid 25 mIU/ml s hCG-koncentrationen < 100 mIU/ml i urinen kommer färgen endast att visas på teststjärna T1, men inte på T2, T3 eller T4. Vid 100 mIU/ml s hCG-halten < 300 mIU/ml i urinen kommer färgen att visas på T1 och T2, men inte på T3 och T4. Vid 1000 mIU/ml s hCG-halten > 1000 mIU/ml i urinen kommer färgen att visas på teststjärna T1, T2 och T3, men inte på T4. Vid hCG-halten är ≥ 1000 mIU/ml kommer färgen att visas på alla teststjärnera, T1, T2, T3 och T4.

Läs instruktionerna noggrant!

Avsedd användning

Semikvantitativt själv-test avsedd för detektion av hCG (human Chorionic Gonadotropin) i urin för tidig upptäckt av graviditet.

Avsedd användare

För hemmabruk till kvinnor i fertilitäder.

Innehåll

- Ytterförpackning: foliepåse, bruksanvisning
- Foliepåse: 1 st teststika, 1 st kottmedel

Material som behövs men inte ingår

Timer och uppåmlingskopp.

SÅ HÄR GÖR DU TESTET

Du kan testa närmast helst under dygnet, och redan 4 dagar innan förväntad menstruation, men sakrast är att mäta morgonurinen, då hCG-koncentrationen är som högst.

När du har läst instruktionerna och är redo att utföra testet tar du ut graviditetstestet ur innerförpackningen. Använd teststicken med en gång.



STEGL 1: UTFÖR TESTET

A) Testa direkt i urinstrålen.

Häll teststicken med uppåmlingsdelen riktad nedt i urinstrålen i 10–15 sekunder. Låt inte urinrinn stiga över teststicks plastholje.



STEGL 2: VÄNTA 1-5 MIN

Sätt tillbaka locket och lägg teststicken på en plan och torr yta med resultaten uppåt.

- Vänta i 1–5 minuter innan du läser av resultatet.
- När teststicken börjar reagera färgas hela resultatområdet rosa.



STEGL 3: LÄS AV RESULTATET

Läs av resultatet inom 1–5 minuter, läs inte av några resultat efter 5 minuter då detta kan ge missvisande resultat.

Teststicken har 2 kontrolllinjer (C) och 4 olika testlinjer (T1-T4) för visa antal gravidveckor.



Positivt resultat – Gravid

Du är gravid när minst tre rosa/röda linjer visas mot ljus bakgrund i resultatområdet. Båda två kontrolllinjerna (C) ska tydligt synas som rosa linje samt även minst testlinjen T1 ska synas som en rosa linje, detta betyder att du högst sannolikt är gravid. Om du testar tidigt (innan förväntad mens) eller får svagt positivt resultat (ljusrosa T1 linje) är det bra att testa på nytt 2–3 dagar senare, helst med den första morgonurinen. Om du är gravid, kontakta barnmorska eller gynekolog för rådgivning.

Vilka färger har de linjer som visas?

Färgnyansen på teststjärnen (T) kan variera från ljus till mörkt rosa/rött, beroende på vilken koncentration av hCG det är i urinen. Färgnyansen på pärverkan inte resultaten men endast rosa/röd färg ger giltigt resultat, färg du annan färg vänta på dagar och gör ett nytt test.

Hur länge finns resultatet kvar innan det bleknar bort eller ändras?

Ett positivt svar kommer oftast finnas kvar förordnat, men bakgrundsnivån kan dock mörknära. Om du testat inom 5 minuter efter att testet har utförts, och eventuella förändringar efter 10 minuter ska ignoreras.

Veckoindikator

Räkna antalet linjer för att se hur många veckor som gärt sedan befruktningsdagen. Färgnyansen på teststjärnerna (T1–4) kan variera från ljus till mörkt rosa/rött, beroende på vilken koncentration av hCG det är i urinen. Färgnyansen på pärverkan inte resultaten men endast rosa/röd färg ger giltigt resultat, färg du annan färg vänta på dagar och gör ett nytt test.

Om testet visar att du är gravid?

Om testet visar att du är gravid kan du kontakta barnmorska eller gynekolog för rådgivning.

Hur tillförlitlig är RFSU Graviditetstest?

RFSU Graviditetstest ger mer än 99% säker resultat från och med den dag du förväntar din menstruation.

Försiktighetsåtgärder!

- Ektopisk graviditet (utomkvedshavandeskap) och cystor på äggstockarna kan ge felaktiga resultat. Vissa sjukdomar och cancerformer (t.ex. livmodercancer) kan påverka resultaten. Om du lider av en sådan sjukdom bör du testa om det är denna som orsakar teststrecken.
- Teststica ska ha rumstemperatur vid användning. Efter öppnande bör teststicken användas inom 2 timmar.
- Endast nyligen taget urinprov bör användas. Urinen kan förvaras i kylskåp (0–8°C) i 48 h. Vid testning ska urinprovet ha rumstemperatur.
- Enheten innehåller smal delar, t.ex. kottmedel, som inte får sväljas.
- Testet är enbart avsedd för utvärtes bruk och varje teststika för engångsbruk. Får ej förtäras.
- Om hCG-koncentrationen är mycket hög kan kontrolllinjen bli blek, vilket är normalt.
- Du kan ta testet från 4 dagar innan förväntad mens. hCG-koncentrationen är då låg, vilket kan resultera i ett negativt resultat. Testa igen efter 48–72 timmar med morgonurin.

Tests begränsningar

- Testet ska användas för att identifiera hCG i urinprover. Koncentrationen av hCG i urinprovet kan inte bedömas med hjälp av teststicken och kontrollernas färgstyrka och mättmed. En kontaminerad teststreck, felaktig användning eller något annat störande ämne kan medföra felaktiga resultat. Gör om testet om du misstancker att resultaten är felaktiga.
- Testets omfattning på vänter sida visar att den vänstra teststrecken är 0–10000 mIU/ml, medan den på höger sidan är 0–1000 mIU/ml. Om du har en svag färg och färgen är 1/3 till 2/3 av märket, T2, eller om verkan är 1/2 till 2/3 av märket, T3, kan det bero på HCG-effekten. Om du vill veta exakta resultaten bör du köpa ett nytt test, spada provet 1:10 eller 1:100 med avjoniserat vatten och testa igen.
- hCG kan detekteras i urin som påverkar testresultatet; vissa mediciner, myom i livmoderen, menopaus/klimakteriet, ökad koncentration av hormoner såsom LH, FSH och TSH etc. Det sätts emellertid stor märke till att kontrollera om din menses härliga storlek är normal. Kontakta din barnmorska eller gynekolog om du får oväntade eller inkonsekventa resultat.

Positive analysvärde

Det positiva bestämningsvärdet för denna produkt är ≥ 25 mIU/ml. Alla laboratorier och kliniker rekommenderas att skapa ett eget positivt bestämningsvärd.

Referenser

- Chard T. Pregnancy tests: a review. Hum Reprod. 1992 May, 7(5):701-10. Review.
- American Pregnancy Association. Human Chorionic Gonadotropin (hCG): The Pregnancy Hormone. <http://www.americanpregnancy.org/duringpregnancy/hcglevels.htm>
- Womens Health Research, Dept. of OB/GYN, University of New Mexico, HCG Reference Service. <http://www.hcrcab.com/hCG%20levels.htm>
- Chayen J, Daly JR, Lovendahl P. The cytochemical bioassay of hormones. Recent Prog. Horm. Res. 1976; 32:33-72.
- Henry JB. Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, 18th edition. 1991, WB Saunders and Co.
- Wide L. Clinical Diagnosis of pregnancy. Acta Endocrinol (Copenh) 1960; 35:261.
- Cart, K.J., Clin. Endocrinol. Metab., 1975, 40:537
- Braustein, G. D. Am. J. Obstet. Gynecol., 1976, 26:678
- Batzer, F.R. Fertility & Sterility, 1980, 34:1.
- Engvall, E. Method in Enzymology, 1980, 70:419.
- BC-HCG-SL-TF-04 Midstream V2.0 Patent No.ZL201620117763.9 V2501:01

CE

0123

SYMBOLFÖRKLARING

- IVD In vitro-diagnostisk medicinteknisk produkt

- Läs bruksanvisning före användning

- Utgångsdatum

- Temperaturgränser

