



Tänk på

För ökat välbefinnande kan du använda ett vatten- eller silikonbaserat glidmedel.

Var försiktig när du för in Femidomen så den inte rispas av naglar eller eventuella smycken.

Tillverkad av:
The Female Health Company
www.femalehealth.com

CE
0088

1

Gnugga Femidomen så att glidmedlet fördelas jämnt över hela Femidomen.



2

Ta tag i den inre ringen och tryck ihop den.



3

För in den så långt det går.



4

För in den. Se till att den inte vrids vid införandet.



5

Vid samlag, säkerställ att penis hamnar inuti Femidomen.



6

Avlägsna Femidomen genom att trycka ihop den yttre ringen, dra ut och kasta i soporna. Får aldrig spolras ner i WC.

