



Graviditetstest Digital

Med RFSUs digitale graviditetstest får du ekstra tydelig digitalt svar ved hjelp av symbolene **(Yes+)** / **(No-)** og du kan selv raskt finne ut om du er gravid.

Du kan bruke testen samme dagen mensen skulle ha startet. Du får sikrest resultat når du måler morgenurinen, siden den har høyest hCG-konsentrasjon. Testens følsomhet er 25 mIU/ml.



Les instruksjonene nøye!

Spørsmål og svar

Hvordan fungerer RFSU Digitale Graviditetstest?
Når du blir gravid, begynner kroppen å produsere et hormon som heter hCG (human Chorionic Gonadotropin). Innholdet av hCG stiger tidlig i graviditeten. Graviditetstesten reagerer på dette hormonet og du kan teste fra den dagen du venter menstruasjonen. Testens følsomhet er 25 mIU/ml. Dersom du tester tidlig eller er usikker er det bra å ta en ny test 2 dager senere, helst med den første morgenurinen.

Hvor pålitelig er RFSU Digitale Graviditetstest?
RFSUs digitale graviditetstest har vist en nøyaktighet på >99% i å oppdage graviditetshormonet utført i laboratoritester av 30 urinprøver.

Det kan oppstå negative resultater hvis nivået av graviditetshormonet i urinen ikke er høyt nok til å påvises. Hvis du likevel tror at du kan være gravid, bør du vente til det har gått noen dager over forventet menstruasjon, og utføre testen på nytt med den første morgenurinen. Husk at du ikke skal drikke store mengder før du tester deg.

Hvor raskt kan jeg bruke RFSU Digitale Graviditetstest?
Du kan bruke RFSU Digitale Graviditetstest fra den dagen du venter menstruasjonen. Har du uregelmessig menstruasjon, test med hensyn til den lengste menstruasjonssyklusen du har hatt de siste månedene.

Påvirkes resultatet av hvor mye væske jeg drikker?
Svært stort væskeinntak kan fortynne urinen, slik at den mengden hCG som finnes i urinen kanskje ikke oppdages. Du bør derfor ikke endre ditt vanlige væskeinntak. Du kan øke hCG-konsentrasjonen i urinen ved å drikke mindre og ikke tisse på ca. 2 timer før testen tas. Du bør ta testen med morgenurin.

Viktig å tenke på

- Les bruksanvisningen nøye før bruk.
- Kun til in vitro-diagnoser.
- Til selvtesting.
- Lagres ved +2–30°C. Må ikke fryses.
- Testen skal ha romtemperatur ved bruk.
- Bruk testpinnen med én gang du har åpnet emballasjen.
- Oppbevares tørt og unngå sollys.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke brukes flere ganger. Kast batteriet og testpinnen i henhold til gjeldende forskrifter.
- Testen skal ikke brukes etter utløpsdato angitt på pakken.
- Ikke bruk urinprøven din hvis den inneholder blod, er grumsete eller har unormale partikler. Dette kan påvirke testens nøyaktighet.
- Dette produktet er bare en foreløpig graviditets test. Du bør kontakte din lege for videre diagnose.

Viktig informasjon

- Måleren vil slå seg av automatisk hvis oppsugingsdelen ikke fuktes med urin innen 8 minutter etter at måleren er slått på.
- Måleren slås ikke av etter målingen. Testresultatet vises på skjermen så lenge batteriene er aktive (ca 24 timer).
- For å unngå forurensning, anbefaler vi at du setter på hetten og slår av måleren etter å ha sett testresultatet.
- Kan gjenvinnes! Emballasjen sorteres som papir, mens brukte testpinner skal sorteres som batteri — batteriet sitter på baksiden av pinnen. Før du kaster den brukte testen, må du fjerne batteriet ved å åpne dekkelet på baksiden av testpinnen. Kast batteriet og testpinnen med hetten i henhold til gjeldende forskrifter.

Produsent:
RFSU AB, Box 1279,
Färögatan 33
164 29 Kista, Sweden
www.rfsu.com

Importør:
RFSU Norge AS,
Oslo

Hva skjer under en graviditet?

Når et egg blir befruktet, begynner kroppen å skille ut hormonet hCG (human Chorionic Gonadotropin) i urinen, og hormonmengden fortsetter å øke i første del av svangerskapet. Ved å registrere hCG i urinen kan man avgjøre om en kvinne er gravid eller ikke. RFSUs digitale graviditetstest måler innholdet av hCG i urinen. Testen er rask og enkel å bruke. Resultatet vises 3 til 5 minutter etter at urinprøven er målt. RFSUs digitale graviditets-test har en sikkerhet på >99%. Testen er laget for å brukes samme dagen mensen skulle ha startet.

Hvis du er gravid, kontakt lege eller gynekolog for å få råd. Hvis du ikke er gravid og ikke ønsker å bli det, bør du bruke kondom eller kontakte lege eller gynekolog for å få råd om prevensjon.

Testen inneholder et litiumbatteri på 3V av typen CR2032.

Kan medisiner og sykdommer påvirke resultatet?
Medisiner som inneholder hCG, kan påvirke testresultatet og bør ikke tas mens du bruker denne testen. Rådfør deg med lege før du bruker testen. I noen sjeldne tilfeller kan kvinner som nærmer seg eller er i overgangsalderen, få falske positive resultater med graviditetstester på grunn av et hormon som likner på hCG. Rådfør deg med lege hvis du får et positivt resultat. Ektopiske svangerskap og eggstokkcyster kan gi misvisende resultater. Enkelte sykdommer eller krefttyper kan påvirke resultatet ved å forstyrre produksjonen av graviditetshormonet. Hvis du har noen av tilstandene ovenfor, bør du rådføre deg med lege før du tar en graviditetstest.

Hvis ikke resultatet vises?
Hvis det ikke kommer opp et resultat, ta en ny test og følg bruksanvisningen nøye. Det kan skyldes at du ikke har tatt testen på riktig måte.

Hvor lenge blir resultatet værende før det blekner eller endres?
Resultatet vil være synlig på skjermen så lenge batteriene fungerer, ca 24 timer etter bruk.

Hva skal jeg gjøre dersom testen viser at jeg er gravid?
Ta kontakt med din lege for rådgivning og videre tiltak.

Hva skal jeg gjøre dersom testen viser at jeg ikke er gravid?
Resultatet er >99% sikkert. Har du testet negativt og du fortsatt ikke får menstruasjon, tar du en ny RFSU Digital Graviditetstest. Dersom du igjen får negativt resultat og menstruasjonen uteblir, kontakter du din lege. Vil du vite mer om produktet, gå inn på www.rfsu.no

Oppbevaring
Oppbevar testen i uåpnet pakning i kjøleskap eller romtemperatur. Testen skal ikke utsettes for temperaturer under +2 grader eller over +30 grader. Unngå å utsette pakningen for direkte sollys, fuktighet og varme. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Modell nr
TD-5212

Dimensjoner og vekt
141 mm (L) x 26,5 mm (B) x 16,2 mm (H), 24 g

Brukstemperatur
Hvis testen er lagret i kjøleskap, må du la den ligge i romtemperatur i 30 minutter før du bruker den. Maksimal brukstemperatur er 40 °C.

Lagrings-/transportvilkår
Lagrings-/transportvilkår: +2 — 30 °C, luftfuktighet under 85%. Denne enheten har blitt testet for å oppfylle de elektriske og sikkerhetsmessige kravene i: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-1-2, EN 61326.


RFSU er en ideell organisasjon uten private fortjenesteinteresser. Overskuddet går til informasjon og utdanning i sex- og samlivsspørsmål.

Vil du vite mer om graviditet og fertilitet eller har spørsmål om våre produkter, les mer på rfsu.no



Slik bruker du testen

Du kan bruke testen når som helst på døgnet den samme dagen da mensen skulle ha startet. Du får sikrest resultat når du måler morgenurinen, siden den har høyest hCG-konsentrasjon. Testen skal tas umiddelbart etter at urinen er samlet opp. **Når du har lest instruksjonene og er klar til å teste, tar du graviditetstesten ut av den innvendige emballasjen og tar av hetten. Bruk testpinnen med en gang.**

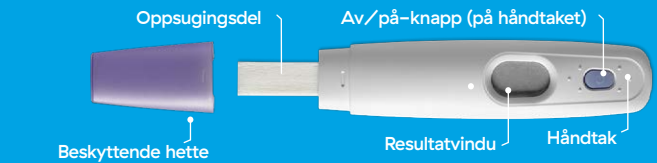


Trinn 1. Start

Ta av hetten, og slå på testpinnen ved å trykke på av/på-knappen. Symbolet vil begynne å blinke.



Trinn 2. Test

- Test direkte i urinstrålen.** Hold oppsugingsdelen med spissen ned i urinstrålen i 5 til 7 sekunder. Ikke la det komme væske på resultatvindu. Sett hetten på igjen, og legg testpinnen flatt på en ren og tørr flate. **OBS! Du må aldri holde testpinnen slik at oppsugingsdelen peker oppover.**
- Eller samle urin i en tørr og ren plast- eller glassbeholder.** Hold oppsugingsdelen i urinprøven i 10–15 sekunder. Sett hetten på igjen, og legg testpinnen flatt på en ren og tørr flate.

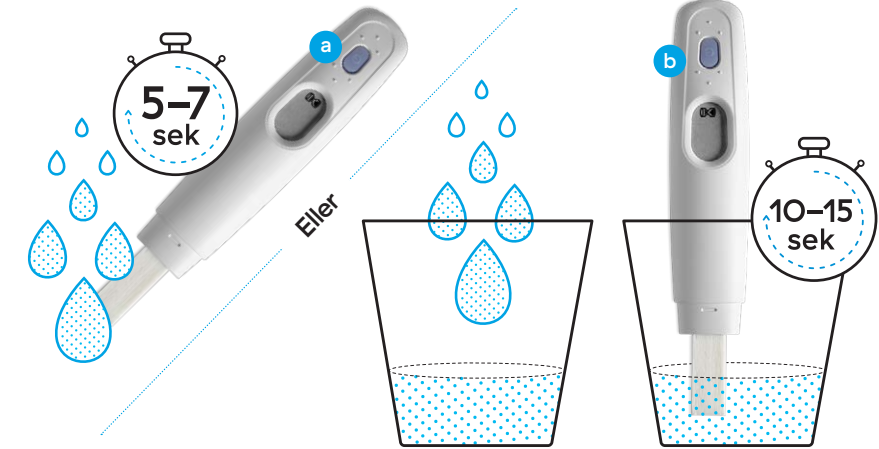

Trinn 3. Vent 3–5 min

Vent i 3 til 5 minutter. La testpinnen ligge helt i ro.



Trinn 4. Les av resultatet

Testresultatet vises når displayet slutter å blinke.



YES+ Positivt resultat – Gravid

Betyr at du KAN være gravid. Ta kontakt med din lege eller gynekolog for å få time til rådgivning og kontroll.



NO- Negativt resultat – Ikke gravid

Betyr at du sannsynligvis ikke er gravid, eller at innholdet av graviditetshormonet foreløpig ikke er høyt nok til at det kan registreres. Eventuelt har du feilberegnet første dag av menstruasjonen.



Testfeil

Feilmelding	Mulig årsak	Hva du bør gjøre
	• Testen ble fuktet med for mye eller for lite urin. • Testen ble ikke lagt flatt etter at den ble fuktet med urin.	• Kontroller utløpsdatoen til testen. • Utfør testen på nytt med en ny testpinne, og pass på at du følger instruksjonene nøye.
	• Problem med enheten	• Ta testen på nytt med en ny testpinne og pass på at du følger instruksjonene nøye. Hvis det ikke vises noe på skjermen, kan du kontakte RFSUs kundeservice for hjelp.