

ACTIVE

Erection System^{NT®}

Medicinskt hjälpmedel
Erektionshjälp

Bruksanvisning

Svenska



MED*intim*

your natural joy

Orsaker till erektionsstörningar

Några av de vanligaste orsakerna till erektionsstörningar är

- diabetes
- hjärt- och cirkulationssjukdomar (högt blodtryck)
- kärlsjukdomar
- biverkningar av läkemedel
- prostatabesvär eller följder efter prostataoperation
- ålderssymtom
- hormonella eller psykiska problem
- alkoholmissbruk
- följder av nikotinkonsumtion

Produktinformation

ACTIVE *Erection System*^{NT}® är ett medicinskt hjälpmedel för att åstadkomma en erektion. Vakuumpumpen åstadkommer ett undertryck i en cylinder runt penis. Det får svällkropparna att fyllas med blod, så att lemnen blir styva. Därefter skjuts en stasring över penisskäftet. När cylindern tas bort, hindrar ringen blodet från att rinna bort, och därmed bibehålls erektionen. Med den bibehållna erektionen blir det möjligt att genomföra ett normalt och tillfredsställande samlag. Efter samlaget tas ringen bort igen. Alla delar kan förvaras i asken som medföljer och användas igen.

ACTIVE *Erection System*^{NT®} består av följande delar:

- Kon
- Styrningshylsa 1
- Styrningshylsa 2
- Cylinder av akrylplast
- Pumphuvud, elektriskt, med 3 batterier AAA 1,5 volt
- 4 olika stasringar i storlekarna 10, 12,5, 15 och 20 mm
- Glidmedel
- Bruksanvisning

Användning

ACTIVE *Erection System*^{NT®} är lätt att använda – men bör före den första användningen provas i lugn och ro samt ensamhet. När sedan båda parter är bekanta med **ACTIVE *Erection System*^{NT®}**, finns det goda chanser att uppleva en sexualitet som är tillfredsställande för båda – även vid högre ålder, sjukdom eller rörelsehinder.

För att hålla bästa möjliga erektion är det viktigt att välja rätt stasring. Med en för stor ring hålls inte styvheten tillräckligt bra. Erektionen ger med sig när ringen skjuts på eller försvinner helt.

Med en för liten ring kan det bli smärtsamt. Ta i så fall av stasringen och välj en större när penis blivit styv igen.

Stasringarna är avplattade på insidan för att ge en större yta som trycker mot penisvenen utan att göra ont.

Styrningshylsa 1 är avsedd för påskjutning av stasringarna 1 (10 mm) eller 2 (12.5 mm).

Styrningshylsa 2 är avsedd för påskjutning av stasringarna 3 (15 mm) eller 4 (20 mm).

Konen är bara till för att skjuta över en ring på en hylsa.

Systemets delar

I pumphuvudet finns vakuumpumpens motor. Ta av pumphuvudets kåpa och vinkla upp fliken med typmärket och lägg i de tre 1,5 V AAA-batterierna. Se till att plus- och minuspolar kommer åt rätt håll. Kontrollera att polerna stämmer med symbolerna i batterifacket.

Strömbrytare

Plus + och minus – tryckknappar


På pumphuvudet sitter tryckknapparna märkta med + och med –. Då du trycker på + är apparaten påslagen. Om du trycker på knappen på nytt, blir sugeffekten och därmed undertrycket inne i cylindern kraftigare. Då du trycker på – minskar apparatens effekt och den kan avstängas helt genom att tryck på denna knapp. Då apparatens motor är påslagen upplyser två LED-lampor cylindern.

Luftning


På pumphuvudet sitter en tryckknapp ●. Genom att trycka på denna knapp släpps luft in i cylindern ifall undertrycket (vakuumet) i cylindern blir för högt. När du trycker på den, släpps genast luft in i apparaten och undertrycket försvinner.

Så här används **ACTIVE Erection System**^{NT}


1) Ha alla delar av **ACTIVE Erection System**^{NT} till hands.

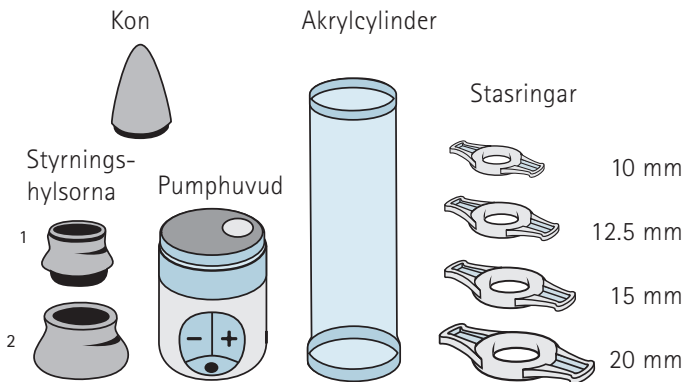


2) Sätt pumphuvudet på akrylcylindern.

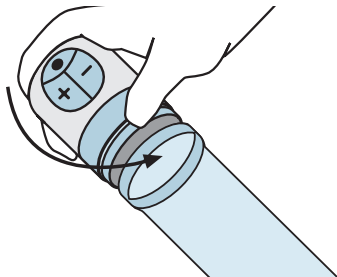


3) Sätt konen på akrylcylinders motsatta, öppna ände.

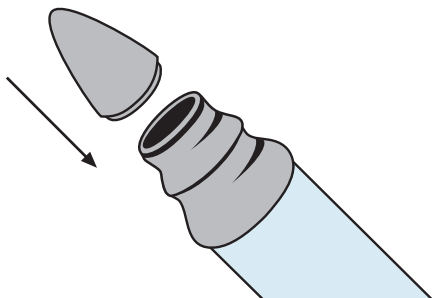


4) Börja med en 20 mm stasring. Skjut den på cylinders öppna ände med hjälp av konen. Ta bort konen. Om ringen är för stor, fortsätt med närmast mindre ring.

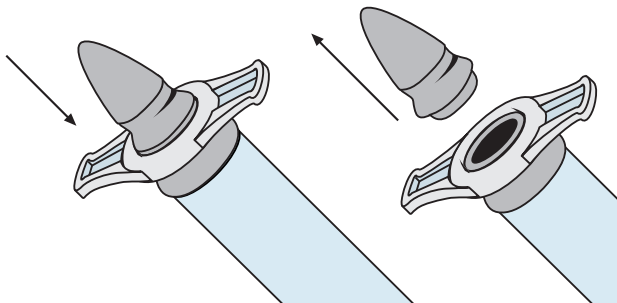


- 5) Fukta penisskافتet med glidmedel, så att akrylcylindern tätas tillräckligt när den sätts på i nästa steg. Ta eventuellt bort en del hår.

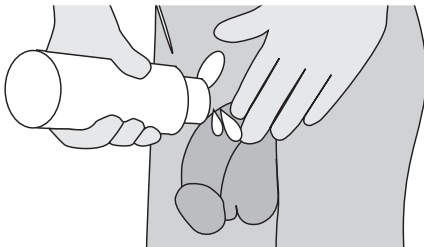

- 6) Skjut akrylcylindern med påsatt ring vid den öppna änden över den icke erigerade lemnen, och tryck cylindern och pumphuvudet mot kroppen. Börja nu pumpa, så att det bildas ett undertryck i cylindern. Starta pumpen genom att trycka på plus + knappen. Det syns att penis styvnar. Om undertrycket blir för stort, kan det göra ont. Släpp då in luft i cylindern genom att trycka på knappen märkt med ●.

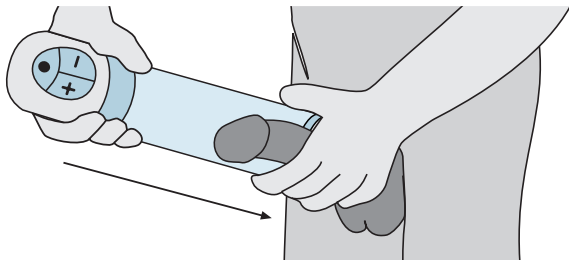


7) Skjut stasringen över den erigerade lemmen så snabbt

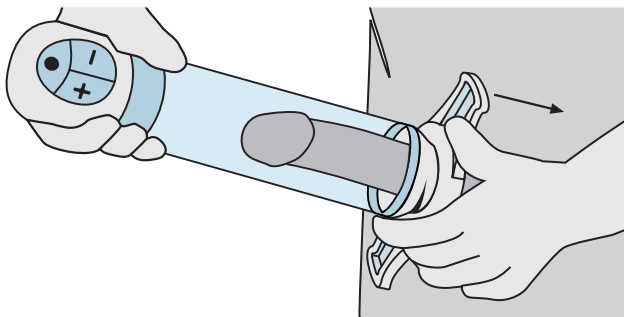


som möjligt och så långt som möjligt mot penisroten.

8) Den erektion som uppkommit och bibehålls räcker för att uppleva ett tillfredsställande samlag.

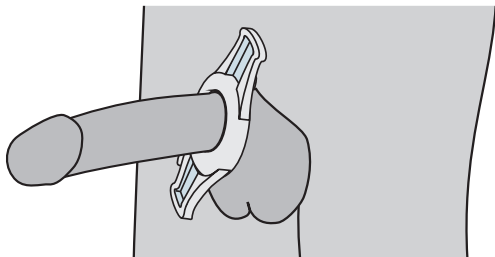

9) Efter höjdpunkten (orgasmen) **skall ringen tas bort.**

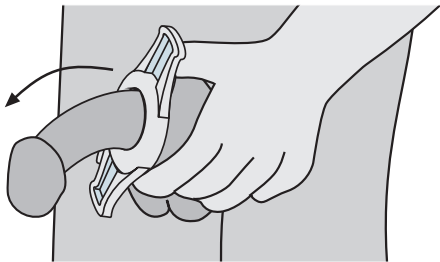

Viktiga anmärkningar

- Stasringen skall inte användas längre än 30 minuter.
- Sov inte med stasringen **på** penis di undviks vävnadsskador på grund av att genomblödningen minskas eller upphör under längre tid.
- Vid utlösningen syns ingen sperma, eftersom ringen hindrar den från att avgå så att det syns. När ringen tas bort, rinner sperman ut ur urinröret. Det är inte skadligt att den hållits kvar ett tag.
- Före användning skall stasringarna göras elastiska genom att doppas en kort stund i varmt vatten. Det förlänger hållbarheten.
- Ringarna är förbrukningsvara och behöver ibland byts ut.
- **Låt inte ringarna komma i kontakt med glidmedel som innehåller mineraloljor och inte med etergas.**

- Lämpliga glidmedel, t.ex. SYLK eller KCLICK, finns på apotek eller kan rekvireras från oss.
- Om apparaten inte skall användas under längre tid, bör batterierna tas ur.
- Ett tecken på att batterierna börjar ta slut är att pumpmotorer börjar gå ojämnt. Då ska du lägga in nya batterier enligt anvisningen i denna instruktion.
- Om apparaten inte skall användas under längre tid, bör batterierna tas ur.

Biverkningar

Tänkbara biverkningar är: blåmärke i penisskaftet och/eller ollonet, vävnadsskada om undertrycket slås alltför kraftigt och alltför snabbt på.

Rengöring

ACTIVE *Erection System*^{NT} kan, med undantag av motor och pumphuvud, lätt rengöras med varmt vatten och tvål.

Ta då av pumphuvudet från apparaten. Rengör motorns utsida med en fuktig trasa.

Använd inga kraftiga rengöringsmedel. Alla delar kan förvaras diskret i den medföljande asken.

Kassering

Alla delar utom motor och batterier kan kastas som hushållsavfall. Motorn skall kastas som elektrisk apparatur. Kasta tömda batterier i batteriholk eller motsvarande.

Garanti

Lagenlig garanti om 2 år gäller för alla delar som inte är förslitningsdelar. Garantin upphör att gälla om delarna hanterats på fel sätt, till exempel om de tappats. Vi rekommenderar att apparaten skickas till oss vartannat–vart tredje år för teknisk kontroll.

Material

- Kon: ABS-plast
- Styrningshylsa 1 och 2: ABS-plast
- Stasringar: biologiskt skonsam polymer
- AAA-batterier 1,5 Volt
- 

Alla delar och förslitningsdelar (stasringarna) samt glidmedel kan beställas separat.

CE 483 Medicinsk produkt klass IIa

Tillverkare och leverantör

KESSEL Marketing & Vertriebs GmbH

Kelsterbacher Str. 28

D-64546 Mörfelden-Walldorf/Germany

Tel. +49 6105 - 20 37 20

Fax +49 6105 - 45 59 01

service@kessel-marketing.de

